



LiceGuard® ROBI COMB®



Place 1 AA battery (not included) in the battery compartment.

Insérer une pile AA (non incluse) dans le compartiment à pile.

Coloque una pila AA (no incluida) en el compartimento.



Push the switch to the "on" position. During the entire time the Robi Comb® is in operation you will hear a humming sound.

Glisser l'interrupteur à la position "On." Lorsqu'on le met en fonction ainsi que lors de son fonctionnement, le Robi Comb® émet un bourdonnement.

Ponga el boton en posicion ON. Durante toda la duracion del tratamiento debe haber un zumbido.



Position the Robi Comb® so that the flat surface is at a 45 degree angle to the roots of the hair. As you comb the hair the humming sound will stop momentarily every time a louse is destroyed.

Positionner le peigne Robi Comb® afin qu'il forme un angle de 45 degrés par rapport à la racine des cheveux. Pendant qu'on peigne les cheveux, le bourdonnement s'arrêtera momentanément chaque fois qu'un pou est détruit.

Coloque Robi Comb® a 45° de la raíz del cabello. Mientras peina el cabello, el zumbido debe detenerse momentaneamente cada vez que un piojo sea destruido.



Clean the teeth with the small brush provided to stop the humming noise.

Nettoyer les dents du peigne à l'aide de la petite brosse fournie, et le bourdonnement se fera entendre de nouveaux.

Limpie el peine con el cepillo incluido en el paquete y el zumbido volvera a sonar.

For complete protection also use LiceGuard®:

Egg Remover Shampoo • Egg & Lice Comb • Repellent Spray

Pour la protection complète utiliser LiceGuard®:

Extracteur des poux & des lentes • Peigne pour poux et lentes • Répulsif de poux

Para la protección completa también use LiceGuard®:

Champú removedor de liendres • Peine para liendres y piojos • Aerosol repelente

LiceGuard® ROBI COMB® is manufactured by ARR Health Technologies, Inc. U.S.A. ©2007. Made in P.R.C.

www.LiceGuard.com

FARMACIA *Sagrada Familia*

FARMACIA CON EXTENSION HORARIA AUTORIZADA
Lunes a Sabados 8 hs. a 20 hs.
Colon: Rivadavia y Colon, Santa Lucia
Tel. 2528000
Don Bosco: 9ta. Fe. Nro. 848, Capital
Tel. 4274005
San Pantalon: Rivadavia 100, Capital
Tel. 4219690
Plaza: Rivadavia 90 y/ Capital
Tel. 4224002
FARMACIAS 24 HS. 360
Echegaray: Av. Bona y Santa Fe, Capital
Tel. 421-3600

Sagrada Familia

FARMACIA

Y

ORTOPEDIA